

Ihre Gesundheit ist kostbar – gehen Sie pfleglich damit um!



Edelsept
BY *Produits Dentaires*



Ihre Instrumente sind ein zentraler Bestandteil Ihrer Arbeit – pflegen Sie sie gut!



EdelXtra

Das Instrumenten-Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit dem angenehmen Duft.

1L, 2.5L, 5L

EdelXtra ist das Reinigungs- und Desinfektionsmittel für alle Ihre medizinischen und zahnmedizinischen Instrumente. EdelXtra enthält korrosionshemmende Wirkstoffe. Ultraschallbad: **OK** ☑

Bakterizid (z. B. gegen MRSA), fungizid, mykobakterizid (z. B. gegen M. terrae, M. avium), viruzid (z. B. gegen HBV, HIV, HCV, Vacciniavirus, Herpesvirus, SARS-Virus).

Anwendung: 2 % 15 min.; 1 % 30 min.; 0,5 % 60 min. Sporizid 2 % 15 min.



EdelLizerAP

High-Level-Desinfektion Ihrer Instrumente.

1Kg, 5Kg

EdelLizer AP ist ein High-Level-Desinfektionsreiniger auf Peressigsäure-Basis für thermolabile medizinische Instrumente, der verkrustete organische Ablagerungen zuverlässig entfernt. Ultraschallbad: **OK** ☑

Bakterizid (z. B. gegen MRSA), mykobakterizid (z. B. gegen M. terrae, M. avium), viruzid (z. B. gegen HBV, HCV, HIV, Herpesvirus, Influenzavirus/H5N1, Adenovirus, Polyomavirus, Vacciniavirus, Poliovirus), fungizid und sporizid.

Anwendung: 15 min. in 2-prozentiger Lösung = 20 g/l (unabhängig vom Vorliegen organischer Substanzen).



EdelDrill

Die beste Wahl für Ihre rotierenden Instrumente.

2.5L, 5L

EdelDrill ist der gebrauchsfertige Desinfektionsreiniger für alle Bohrer mit Diamantspitze oder Beschichtung sowie für Wurzelkanalinstrumente. EdelDrill enthält korrosionshemmende Wirkstoffe. Ultraschallbad: **OK** ☑

Bakterizid (z. B. gegen MRSA), mykobakterizid (z. B. gegen M. terrae, M. avium), viruzid (z. B. gegen HBV, HIV, HCV, Vacciniavirus, Herpesvirus), fungizid und sporizid.

Anwendung: 15 min.



EdelZyme

Enzymatisches Instrumenten-Reinigungs- & Desinfektionsmittel der neuen Generation.

1L, 2.5L, 5L

EdelZyme enthält einen Enzymkomplex, der die Auflösung organischer Verbindungen wie Proteine, Glykoside und Lipide fördert. Ultraschallbad: **OK** ☑

Bakterizid (z. B. gegen MRSA, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa), mykobakterizid (z. B. gegen M. terrae und M. avium), viruzid (z. B. gegen HBV, HCV, HIV, Influenzavirus A,B,C (Vogelgrippevirus), Pockenvirus, HSV, VZV, HHV8, RSV, HTLV und alle behüllten Viren), fungizid (Candida albicans, Aspergillus niger).

Anwendung: 3 % 15 min.; 2 % 30 min.; 1 % 60 min. Sporizid 1 % 60 min. oder 3 % 15 Min.

Instrumente

Ihre Geräte sind Ihre Visitenkarte!



EdelSpray

Oberflächendesinfektion
beim Patientenwechsel
in nur 30 Sekunden.



2.5L, 5L

EdelSpray ist ein rasch wirkendes, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für alle alkoholbeständigen kleinen Oberflächen und Geräte in der klinischen Chirurgie und Dentalchirurgie.

Bakterizid (z. B. gegen MRSA), fungizid, tuberkulozid (M. terrae), viruzid (HBV, HCV, HIV, Adenovirus, Vacciniavirus, SARS-Virus, Rotavirus, Herpesvirus, Influenzavirus/H5N1).

Anwendung: 30 Sek.; Tuberkulose: 1 Minute bei Vorliegen organischer Substanzen. Nachwischen nicht erforderlich.

PS: In zwei Duftnoten erhältlich, **Blumig** und **Minze**

Oberflächen



EdelPlus

Wirksame, schnelle und
gründliche Desinfektion und
Reinigung der Böden in Ihrer Klinik.

2.5L

EdelPlus ist ein Desinfektionsreiniger-Konzentrat mit Duftzusatz für Böden, Wände und alle wasserfesten großen Flächen. EdelPlus ist sehr materialfreundlich gegenüber Glas, Keramik, Metall, Gummi, Holz, Aluminium und Acrylglas. Behandelte Oberfläche nach der Einwirkzeit mit Wasser nachwischen.

Bakterizid, viruzid (HBV, HCV, HIV, Vacciniavirus, SARS-Virus, Herpesvirus, Influenzavirus/H5N1) und fungizid.

Anwendung: 1 min. 5%, 5 min. 3%, 15 min. 2%, 60 min. 1%, 4 Stunden 0,5%.



EdelFoam

Für konstante Sicherheit.

750ml

EdelFoam ist ein gebrauchsfertiger Sprühschaum mit Duftzusatz zur Desinfektion und Reinigung von kleineren wasserbeständigen Oberflächen wie Mobiliar, Dentaleinheiten etc. EdelFoam ist extrem materialfreundlich.

Bakterizid, fungizid, viruzid (z. B. gegen HBV, HCV, HIV, Vacciniavirus, SARS-Virus, Influenzavirus/H5N1). Behandelte Oberfläche nach der Einwirkzeit mit Wasser nachwischen.

Anwendung: 1 min.



EdelWipes

Dafür werden Ihnen Ihre
Patienten dankbar sein:
EdelWipes, immer zur Stelle.

150 wipes

Mit den dezent parfümierten Desinfektionstüchern EdelWipes sparen Sie bei jedem Patientenwechsel kostbare Zeit. Die Tücher desinfizieren schnell und zuverlässig Tastaturen, Telefone, Türgriffe, Turbinen, Hand- und Winkelstücke. Die Oberflächen sind im Nu wieder trocken.

Bakterizid, fungizid, tuberkulozid (M. terrae), viruzid (HBV, HCV, HIV, Adenovirus, Rotavirus, Vacciniavirus, Herpesvirus, Influenzavirus/H5N1, SARS-Virus).

Anwendung: 30 sek.; Tuberkulose: 1 Minute bei Vorliegen organischer Substanzen.

PS: In zwei Duftnoten erhältlich, **Blumig** und **Minze**

Ihre Sicherheit liegt in Ihren eigenen Händen



PandySept

Mit der zuverlässigen Wirkung von PandySept fühlen Sie sich in sicheren Händen.

1L, 2.5L

PandySept ist eine gebrauchsfertige alkoholische Lösung für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Klinische Prüfungen belegen sein breites Wirkungsspektrum. Es ist ideal für Patientenbehandlungen und alle Situationen, in denen Kreuzkontaminierungsgefahr besteht. PandySept ist der perfekte Partner für PandyPower.

Bakterizid (z. B. gegen *M. terrae* und MRSA), viruzid (HBV, HCV, HIV, Vacciniavirus, SARS-Virus, Herpesvirus, Influenzavirus/H5N1), fungizid.

Anwendung: 30 sek. (chirurgische Desinfektion: 3 min.). Tuberkulose- und Vaccinia-Prophylaxe: 1 Minute bei Vorliegen organischer Substanzen.



PandyGel

Hält Ihre Hände frisch und sauber.

250ml

PandyGel ist ein thixotropes hydroalkoholisches Gel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion, das das natürliche Gleichgewicht der Epidermis aufrechterhält.

Bakterizid (z. B. gegen *M. terrae* und MRSA), viruzid (HBV, HCV, HIV, Vacciniavirus, SARS-Virus, Herpesvirus, Influenzavirus/H5N1), fungizid.

Anwendung: 30 sek. (chirurgische Desinfektion: 3 min.). Tuberkulose- und Vaccinia-Prophylaxe: 1 Minute bei Vorliegen organischer Substanzen.



PandyBlue

Saubere Hände, auch wenn kein Wasser in Reichweite ist.

250ml

PandyBlue ist ein hydroalkoholisches Gel für die hygienische und antibakterielle Händereinigung ganz ohne Wasser. PandyBlue wirkt nicht hautreizend. PandyBlue ist auch für empfindliche Haut geeignet und hat einen hautfreundlichen pH-Wert.

Anwendung: Hände ohne Wasser mit ca. 3–4 ml PandyBlue einreiben.

Hände



PandySoap

Wohltuend bei häufigem Händewaschen.

1L, 2.5L

PandySoap ist eine Reinigungsemulsion speziell für häufiges Händewaschen. PandySoap wurde von Dermatologen entwickelt. Es enthält keine Farb- und Konservierungsstoffe und ist nur sehr leicht parfümiert.

Anwendung: Geringe Menge PandySoap auf den feuchten Händen verteilen, abspülen und Hände trocknen.



PandyScrub

Händereinigung mit chirurgischer Gründlichkeit.

1L, 2.5L

PandyScrub ist ein antiseptisches Mittel zur chirurgischen Händereinigung für das gesamte medizinische Personal. Es zeichnet sich durch rasche bakterizide Aktivität und langanhaltende antimikrobielle Wirkung aus. PandyScrub enthält einen rückfettenden Wirkstoff für die Hautpflege und ist dezent parfümiert.

Anwendung: Vorschriften für die chirurgische Händereinigung: Nasse Hände und Unterarme 3 Minuten lang mit 5 ml PandyScrub und nasser Bürste reinigen, insbesondere die Nägel, Nagelhäute und Fingerzwischenräume. Gründlich abspülen und trocknen. Wassertemperatur nicht zu heiß und nicht zu kalt wählen.



PandyCare

Mit PandyCare fühlen sich Ihre Hände länger jung!

50ml

Intensive Feuchtigkeitscreme speziell für trockene, rissige Haut. PandyCare ist die perfekte tägliche Pflege, die Ihre Hände mit einem Plus an Feuchtigkeit vor dem Austrocknen schützt. PandyCare wurde von führenden Dermatologen entwickelt. Es ist frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen.

“Waschen Sie sich in Gottes Namen die Hände!” Ignaz Phillip Semmelweis (1818).

Sie und Ihre Patienten verdienen umfassenden Schutz



EdelJet

Das beste Desinfektionsmittel für Ihr Absaugsystem!

2,5L, 5L

EdelJet ist ein besonders sparsames Konzentrat, das ohne übermäßige Schaumbildung Ihre Absaugsysteme und Amalgamabscheider wirksam reinigt, desinfiziert, deodorisiert und pflegt. Für alle bekannten Absaugsysteme geeignet.

Bakterizid, viruzid (HBV, HCV, HIV, Vacciniavirus, SARS-Virus, Herpesvirus, Influenzavirus/H5N1), fungizid.

Anwendung: 15 min. 2%: 20 ml auf 980 ml warmes Wasser (max. 60 °C). Reinigen Sie das System gemäß der Anleitung des Herstellers.



Spezialanwendungen



EdelBowl

So bleibt die Speischale immer strahlend weiß und sauber.

750mL

EdelBowl ist ein sanftes gebrauchsfertiges Reinigungsmittel speziell zur Reinhaltung zahnmedizinischer Speischalen. Es entfernt zuverlässig alle Rückstände von Blut, Zahnmaterial, Plaquenachweis- und Abformmaterial.

Anwendung: Mittel auf der Schale verteilen und einige Minuten einwirken lassen oder mit Schwamm oder Bürste auftragen. Mit klarem Wasser nachspülen. Unbedingt zuerst reinigen, bevor Sie die Abflussleitungen desinfizieren!



EdelTray

Trayreinigung mit höchster Gründlichkeit – für stets einsatzbereite Trays.

2,5L

EdelTray ist ein biologisch abbaubares Konzentrat, das Trays reinigt, ohne sie zu beschädigen. Mit maximaler Wirksamkeit löst es rasch alle Rückstände von Alginat, Zinkoxid-Eugenol-Paste, Phosphat- oder Carboxylzement sowie thermoplastischen Abformpasten und Wachsen.

Anwendung: EdelTray kann in 5- bis 10-prozentiger Lösung oder bei hartnäckigen Verschmutzungen unverdünnt angewendet werden. Legen Sie die zu reinigenden Gegenstände in die Lösung ein und lassen Sie diese je nach Verschmutzungsgrad bis zu 45 Minuten einwirken. EdelTray ist auch für Edelstahl geeignet. Ultraschallbad: **OK**



EdelMould


Unglaublich wirkungsvoll!

2,5L

EdelMould ist eine Lösung zum Desinfizieren und Reinigen von Prothesenmaterialien wie Silikon, Polyethergummi, Alginat oder Hydrokolloid. Mit frischem Zitrusduft.

Bakterizid, fungizid, viruzid (z. B. gegen HBV, HCV, HIV, Rotavirus) – 5 Min. (gebrauchsfertig).

Anwendung: Abdruck ins Bad geben und mindestens 5 Minuten einwirken lassen. In der Maschine: Produkt auf die Abdrücke aufsprühen, bis sie vollständig bedeckt sind, und mindestens 5 Minuten einwirken lassen.

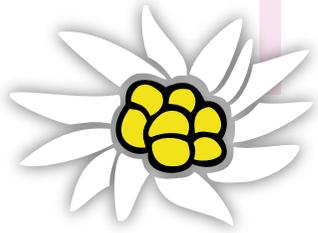

PandyPower

Mit PandyPower wird die Händedesinfektion sicher,
bequem und zuverlässig – und zeitsparend obendrein!



- Die wichtigsten Vorteile von PandyPower:
- PandyPower bedeckt beide Hände gleichmäßig mit PandySept.
 - Berührungslose Desinfektion: Zehn Stufen von 0,5 ml bis 5 ml. Sie erhalten jedesmal exakt die voreingestellte Dosis.
 - Frei wählbare Dosis: Keine Aerosoldämpfe.
 - Kein Düse: Automatische Erkennung.
 - Unkompliziert im Gebrauch: Perfekt kombinierbar mit PandySept (0,5 ml; 1L Flaschen).
 - Kompatibilität: Ständige Netzstromversorgung oder Betrieb mit wiederaufladbaren Batterien Ca. 6 Wochen Betriebsbereitschaft. Langlebiger Akku.
 - Netzstrom- oder Akkubetrieb: Überschüssiges Desinfektionsmittel wird von einer saugfähigen Unterlage aufgefangen; Fußböden und Arbeitsflächen werden geschont.
 - Auffangvorrichtung: Zähler, der protokolliert, wie oft welche Mengen entnommen wurden – für die ordnungsgemäße Kreuzkontaminierungskontrolle.
- CE-Kennzeichnung.



PD-Spender für Handlotion

Auch für Seife, Schaum, Flüssigkeiten und Gel – Fünf Einstellungen
stehen zur Auswahl.



Desinfektions-Box für Dentalbohrer



Instrumentenwanne - 3L





Das Edelweiß oder Silberstern ist die Alpenblume schlechthin. Ursprünglich kommt die Pflanze aus der sibirischen Steppe, und auch im Himalaya trifft man sie in bis zu 5.400 m Höhe an (Quelle: W. Rytz, Ed. Payot Lausanne).

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

Als kompetentes Mitglied des dentalmedizinischen Teams bringen Sie stets vollen Einsatz für die gute Versorgung und die Sicherheit Ihrer Patienten. Doch darüber dürfen Sie nicht Ihre eigene Gesundheit vernachlässigen!

Die EdelSept-Hygieneproduktlinie ist speziell darauf ausgelegt, für Ihre Sicherheit zu sorgen und Sie im täglichen Kampf gegen mikrobielle Infektionen zu unterstützen.

Alle EdelSept-Produkte sind absolut frei von Aldehyden und Phenolen. EdelSept-Produkte erfüllen die anspruchsvollsten Umweltnormen.

Unser Dank gilt all den Frauen und Männern, die als Sprechstunden- oder Zahnarzthelfer, Pflegepersonal, Assistenten, Praxismanager, Therapiekordinatoren, Labortechniker, Ärzte, Doktoren und Professoren zur Entwicklung der EdelSept-Produkte beigetragen haben.

Produits Dentaires investiert viel in die Suche nach wirksamen, sicheren, angenehmen und zuverlässigen (zahn-)medizinischen Lösungen. Die Prävention von Kreuzkontaminierungsrisiken steht im Mittelpunkt unserer Vision.

Besuchen Sie uns doch einmal im Internet – wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Ansichten. Und Ihr EdelSept-Vertriebspartner hält Sie gern auf dem Laufenden, was die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der dental chirurgischen Sicherheit angeht.

Angenehmes Arbeiten mit EdelSept!



www.produits-dentaires.ch



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18
CH - 1800 Vevey / Switzerland

Produits Dentaires Italia Srl.
Via Campo Garibaldi 1
I - 22100 Como / Italy